

Body Armor® Heel Reliever Fersen-Freilagerung

Effektive Druckentlastung für Liegendpatienten



Einfaches Anlegen



Platzierung des Fußes

Die Ferse hinter dem innen fixierten Wadenpolster – direkt über der Fersenöffnung platzieren. Die Ferse muss frei „schweben“.



Verschließen

Klettbänder durch die Umlenkschlaufen führen und schließen. Sie sollten locker anliegen und nicht zu fest geschlossen sein.



Prüfen der Freilagerung

Zur visuellen Kontrolle der korrekten Position die Fersenöffnung nutzen.



Prüfen der Passform

Zwischen Ferse und Bett sollte genügend Platz für Finger sein.

Individuelle Anpassung



Fallfuß

Das halbierte zusätzliche Schaumstoffpolster senkrecht hinter der Fußsohle befestigen.




Malleolar Dekubitus (Fußknöchelgeschwür)

Noppen oder Teile des innen fixierten Wadenpolsters an den Auflagestellen um den Fußknöchel entfernen.



Bariatrische Beine

Zur Erhöhung das zusätzliche Schaumstoffpolster verwenden.

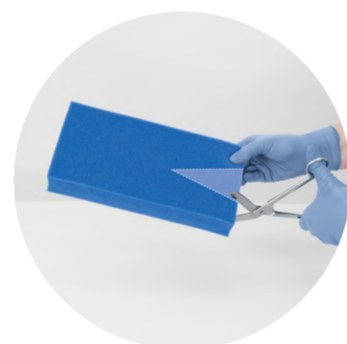

Achillessehne

Bei Rötung der Achillessehne v-förmige Aussparung ausschneiden.

Vermeidung von Hüftaußenrotation



Linkes Bein

Umlenkschlaufen des Positionierungskeils und der Fersen-Freilagerung rechts verbinden, Klettbänder durch die Schlaufen ziehen und schließen. Positionierungskeil nach links klappen.



Rechtes Bein

Klettbänder durch die Umlenkschlaufen des Positionierungskeils führen und mit den Umlenkschlaufen an der Fersen-Freilagerung schließen. Positionierungskeil nach rechts klappen.



Zum Produkt



Vorsicht

Der Patient sollte nicht gehen während er das Produkt trägt. Das Produkt nicht direkt auf der Haut tragen. Alle 6–8 Stunden den Body Armor® Heel Reliever abnehmen und Bein und Fuß auf Hautveränderungen untersuchen. Das Produkt ist nur für die Anwendung an einem Patienten bestimmt.

Größe (One-Size-Fits-All)

- > Universalgröße
- > bis Schuhgröße 47
- > 25–54 cm Wadenumfang
- > rechts und links tragbar

Schaumstoffvarianten

- Genoppt**
Sorgt für eine bessere Luftzirkulation und für einen angenehmen Kühleffekt.
- Glatt**
Speziell für empfindliche Haut. Besonders geeignet für Diabetesprieten.

Reinigung

Sowohl Hand- als auch Maschinenwäsche möglich. Dazu Wasser, reguläres Waschmittel und Desinfektionsmittel verwenden. Maschinenwäsche bei 60°C im mitgelieferten Wäschebeutel oder Kopfkissenbezug. Klettbänder während der Reinigung schließen. Bei Raumtemperatur trocknen lassen. Desinfektion nach dem Waschen mit antiseptischem Spray.

Offizieller DARCO-Vertreter Schweiz

Orthopartner AG
Lenzburgerstrasse 2 - Gebäude 10 - 5702 Niederlenz
Tel. +41 (0) 62 769 88 00 · Fax +41 (0) 62 769 88 01
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | GER
info@darco-europe.com
www.darco-europe.com