

Body Armor® Heel Reliever

Dispositif de décharge du talon

Décharge efficace dans la zone du talon pour les patients alités



Mise en place facilitée



Positionnement du pied

Positionner le talon derrière le rembourrage de mollet fixé à l'intérieur – directement au-dessus de l'ouverture prévue. Le talon doit « flotter » sans entrave.



Fermeture

Enfiler les bandes auto-agrippantes à travers les boucles de sangles et fermer. Elles doivent être détendues et ne pas être trop serrées.



Contrôle de la décharge du talon

Pour s'assurer de la bonne décharge du talon, vérifier visuellement au niveau de l'ouverture du talon.



Contrôle de l'ajustement et de la position

Il doit y avoir la place pour un doigt entre le talon et la surface du lit.

Ajustement individuel



Pied tombant

Fixer le rembourrage supplémentaire coupé en deux perpendiculairement derrière la plante du pied.



Ulcère de la cheville (escarre sur la malléole)

Retirer au niveau des points d'appui autour de la cheville, les alvéoles ou éléments du rembourrage de mollet fixés à l'intérieur.



Jambes après chirurgie bariatrique

Pour l'augmentation de la hauteur, poser le rembourrage en mousse supplémentaire.



Tendon d'Achille

En cas de rougeur au niveau du talon d'Achille, découper un V dans le rembourrage fixé à l'intérieur.

Prévention de la rotation externe de la hanche



Jambe gauche

Attacher les boucles de la cale de positionnement et de la botte de décharge à droite, enfiler les bandes auto-agrippantes à travers les boucles de sangles et fermer. Rabattre la cale vers la gauche de la botte.



Jambe droite

Insérer les bandes auto-agrippantes de la botte à travers les boucles de sangles de la cale de positionnement et fermer à l'aide des boucles de sangles de la botte de décharge. Rabatte la cale vers la droite de la botte.



Au produit



Attention

Le patient ne doit pas marcher lorsqu'il porte le produit. Le produit ne doit pas être porté directement sur la peau. Toutes les 6 à 8 heures, il est recommandé de retirer le Body Armor® Heel Reliever pour vérifier qu'il n'y a pas de modifications cutanées au niveau de la jambe et du pied. Le produit est destiné à être utilisé pour un seul patient.

Tailles (One-Size-Fits-All)

- > Taille unique
- > Jusqu'à la pointure 47
- > Tour de mollet 25 – 54 cm
- > Peut se porter à gauche et à droite

Variantes de mousse



Alvéolé

Les alvéoles assurent une meilleure circulation de l'air et produisent un effet refroidissant agréable.



Lisse

Spécialement conçue pour les peaux sensibles. Indiquée en particulier pour les patients diabétiques.

Nettoyage

Lavable à la main et en machine. Utiliser de l'eau, la lessive habituelle et un désinfectant. Lavage en machine à 60 °C dans le sac de lavage fourni ou dans une taie d'oreiller. Fermer les bandes auto-agrippantes pendant le nettoyage. Laisser sécher à température ambiante. Désinfection après le lavage avec un spray antiseptique.

Représentant officiel de DARCO en Suisse

Orthopartner AG
Lenzburgerstrasse 2 - Gebäude 10 - 5702 Niederlenz
Tel. +41 (0) 62 769 88 00 · Fax +41 (0) 62 769 88 01
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | GER
info@darco-europe.com
www.darco-europe.com