

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER ORTHESE BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER ORTHESE IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

ZWECKBESTIMMUNG / INDIKATIONEN:

Rahmenorthese zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions- und Flexionsbegrenzung

- Verletzungen oder Instabilitäten des vorderen Kreuzbandes mit oder ohne Begleitverletzungen
- Verletzungen oder Instabilitäten der Seitenbänder
- schwere Instabilitäten des Kniegelenks
- Meniskusverletzungen
- Genu recurvatum
- konservative, prä- und postoperative Behandlung, Prophylaxe

KONTRAINDIKATIONEN:

Keine

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

Wenn während der Verwendung dieses Produktes Schmerzen, Schwellungen, Empfindungsänderungen oder ungewöhnliche Reaktionen auftreten, suchen Sie bitte unverzüglich Ihren Arzt auf.

Bei folgenden Krankheitsbildern ist der Gebrauch dieses Hilfsmittels nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angezeigt:

- Hauterkrankungen und/oder Verletzungen im Bereich der Orthese, insbesondere Entzündungen, Schwellungen, Rötungen oder Überwärmung
- Krampfadern, Empfindungsstörungen, Durchblutungsstörungen
- Lymphabflussstörungen, auch außerhalb des Orthesenbereiches

ANWENDUNGSHINWEISE:

- Orthese anlegen. Setzen Sie sich auf die Kante eines Stuhles und lösen Sie alle Klettgurte. Beugen Sie das Knie im 45°-Winkel und legen Sie die Orthese wie in Abbildung A dargestellt an, indem Sie das Gelenk am oberen Rand der Kniescheibe und leicht von der Mittellinie des Beines nach hinten versetzt ausrichten. Stellen Sie sicher, dass die Orthese nicht am Bein verdreht ist.
- Gurte schließen. Ziehen Sie die Gurte durch die gegenüber liegenden Gurtösen und schließen Sie die Klettverschlüsse in der vorgegebenen Reihenfolge:

0. breites Anti-Migration-Band unterhalb des Gelenkes (Abb. B)

1. knienaher Wadengurt (Abb. C)
2. knieferner Wadengurt (Abb. D)
3. knienaher Oberschenkelgurt (Abb. E)
4. knieferner Oberschenkelgurt (Abb. F)
5. Schienbeingurt (Abb. G)

- Korrekten Sitz prüfen. Wenn alle Gurte befestigt sind, sollte sich der Mittelpunkt des Gelenkes direkt über dem oberen Ende der Kniescheibe und leicht von der Mittellinie des Beines nach hinten versetzt befinden. Es wird empfohlen, das Knie einige Male zu beugen oder ein paar Minuten zu laufen, um sicherzustellen, dass sich die Orthese beim Bewegen nicht verschiebt. Danach ziehen Sie die Gurte entsprechend den Schritten 1.-5. erneut fest, um einen sicheren und komfortablen Sitz zu gewährleisten.

- Knieweite einstellen. Die Knieweite kann mittels beiliegender Kondylenpolster unterschiedlicher Stärke angepasst werden.

- Extensions- und Flexionsbegrenzung einstellen (nach ärztlicher Vorgabe nur durch Fachpersonal). Entfernen Sie die Kondylenpolster. Setzen Sie die jeweiligen Begrenzungskeile ein und fixieren Sie diese mit den beiliegenden Schrauben (Abb. H). Nehmen Sie an beiden Gelenken die gleichen Einstellungen vor.

GEBRAUCH UND PFLEGE:

- Falls die Orthese nach Gebrauch angepasst werden muss, alle Gurte gemäß den Anwendungshinweisen festziehen.
- Alle Gurte und Polster können auf den jeweiligen Gliedmaßenumfang des Patienten zugeschnitten werden.
- Die Orthese kann sowohl in Salz- auch in Süßwasser verwendet werden. Nach Gebrauch mit sauberem Leitungswasser abspülen und an der Luft trocknen lassen.
- Gurt- und Polstermaterial in milder, warmer (30°C) Seifenlösung von Hand waschen. Lufttrocknen.
- Schrauben regelmäßig auf festen Sitz prüfen und bei Bedarf nachziehen.
- Gelenke regelmäßig mit Trockenschmiermittel oder Teflon™-Spray schmieren. Zur Schmierung des inneren Gelenkmechanismus Orthese in Flexionsstellung bringen und Schmiermittel in den Gelenkspalt sprühen.
- Die Orthese soll nur mit dem für dieses Produkt bestimmten Zubehör eingesetzt werden.
- Vor Einstellungsänderungen an der Orthese stets den Arzt konsultieren.

VERWENDETES MATERIAL

Rahmen	Aluminium
Gelenke	Aluminium, Edelstahl
Klettgurte	Nylongewebe
Polstermaterial	Velours, EVA Schaum









Latexfrei

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen.

Nur zum Gebrauch an einem Patienten bestimmt.

HINWEIS: ES WURDEN UNTER ANWENDUNG DER MODERNSTEN VERFAHRENSWEISEN SÄMTLICHE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN, UM DIE GRÖSSTMÖGLICHE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, STÄRKE, HALTBARKEIT UND BEQUEMLICHKEIT ZU ERREICHEN; DIESES PRODUKT IST JEDOCH NUR EIN BESTANDTEIL DES GESAMTEN VON EINEM ARZT DURCHGEFÜHRTEN BEHANDLUNGSPROGRAMMS. DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS STELLT KEINE GARANTIE ZUR VORBEUGUNG VON VERLETZUNGEN DAR.

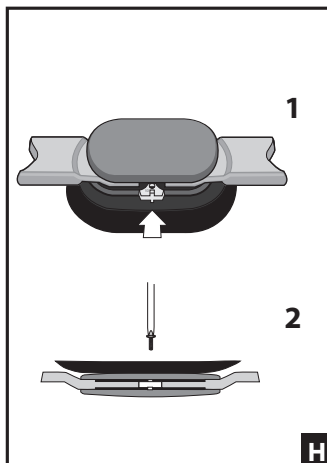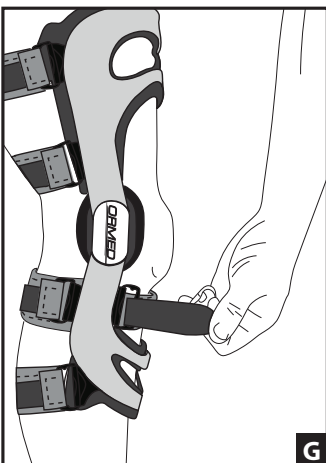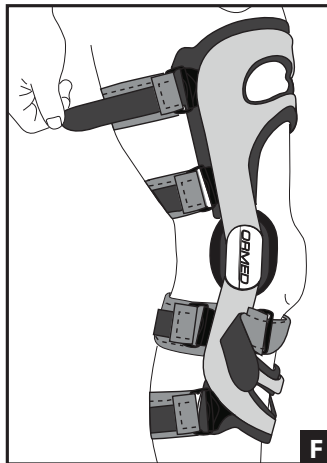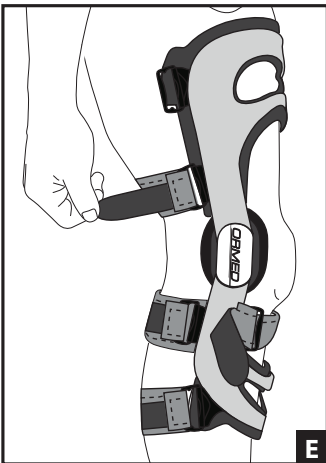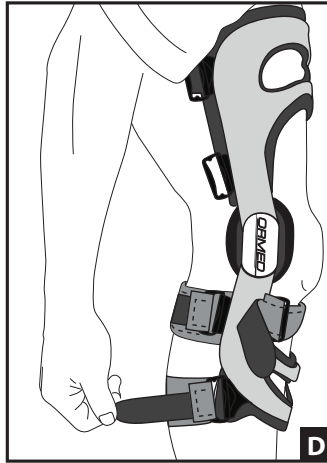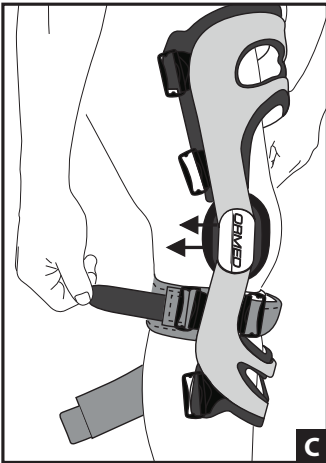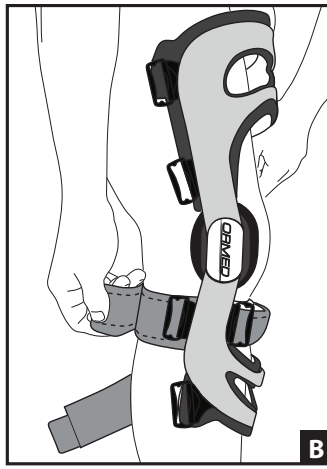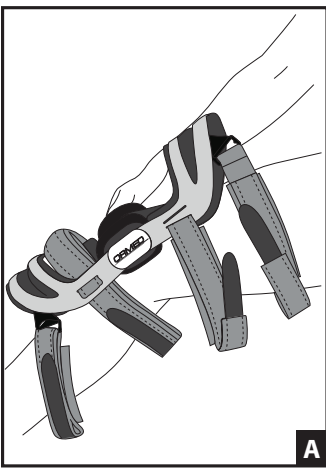



ORMED®

ARTROCARE® PRO3
KNIEORTHESE



DJO, LLC

1430 Decision Street • Vista, CA 92081-8553 • USA

t 800.526.8785 • f 800.457.4221

DJOglobal.com