

# DARCO Posterior Splint Fix

## Fußlagerungsorthese

Innovative Orthese zur Immobilisierung in definierter Position



Hilfsmittelnummer: 23.03.01.0024

### Indikationen

Allgemein anwendbar bei konservativer und postoperativer Therapie von Unterschenkel-, Sprunggelenks- und Fußverletzungen:

- > Achillessehnenriss
- > Prä- und postoperative Lagerung
- > Posttraumatische Stabilisierung / Ruhigstellung
- > Konservative Lagerung
- > Immobilisierung nach Unfall
- > Kurzfristige Stabilisierung (Bandrupturen, Luxationen, Frakturen, Wunden, Zerrungen, Verstauchungen etc.)



# DARCO

Beim postoperativen Einsatz direkt im OP-Saal entfällt lästiges Gipsen oder das Erwärmen und Anmodellieren einer Schiene. **Dadurch verkürzt sich die kostenintensive OP-Zeit deutlich!**



Positionierung des Fußes in der Orthese.



Anlegen und zirkuläres Schließen der Gurtbänder um den Wadenbereich der Orthese.



Zirkuläres Anlegen des schmalen Gurtbandes um den Vorfuß.



Das Gurtmaterial haftet an den Klettbandern an der Außenseite der Kunststoffschale.

## Anlagemöglichkeiten der Gurtbänder



Anlage der drei Gurtbänder zirkulär um den Wadenbereich sowie um den Vorfuß.



Alternativ können auch die beiden schmalen Gurte mithilfe des Klettverschlusses miteinander verbunden werden und das so entstandene lange Band an der Außenschale im Vorfußbereich befestigt und diagonalverlaufend im Sprunggelenksbereich verschlossen werden.

## Eigenschaften

- > Für Achillessehnenpathologien in 20° Spitzfußstellung
- > Optimale Positionierung in definierter Position mit:
  - 3 flexibel positionierbaren Gurtbändern (im Lieferumfang enthalten) oder
  - Herkömmlichen Mullbinden durch eingearbeitete Klettstreifen auf der Außenseite
- > Weiche Innenpolsterung (PE-Schaumstoff)
- > Anatomisch optimierte Passform → Vermeidung von Druckstellen
- > Dauerhaft formstabil
- > Universell rechts und links tragbar

Die DARCO Posterior Splint Fix ist eine gebrauchsfertige Fußlagerungsorthese, die in jeder Versorgungsphase eingesetzt werden kann (auch während radiologischer Untersuchungen).

Bitte beachten Sie bei der Anwendung der DARCO Posterior Splint Fix, dass diese bei Patienten mit einer auffälligen Wadenmuskverkürzung oder einer ausgeprägten Haglund- / posterolateralen Exostose evtl. zu Missempfindungen oder Druckstellen führen kann.

## DARCO Posterior Splint Plus Fix

Version mit moderater Winkelstellung (90° Plus)

- > Zwei ovale Aussparungen sorgen für eine gute Luftzirkulation
- > Anatomisch großvolumige Fersenform zur Vermeidung von Druckstellen
- > Inkl. einem speziellen Saugvlies gegen Wundsekret nach den ersten Post-OP-Tagen



GRÖSSE	FUSSLÄNGE DER SCHIENE	WADENLÄNGE DER SCHIENE	ART.-NR	PZN	ART.-NR.	PZN
--------	--------------------------	---------------------------	---------	-----	----------	-----

Farbe: Weiß-Blau

	Winkel 90° Plus		Winkel 110°	
S	26,5 cm	34,0 cm	PSF1-90-P 17916909	PSF1-110 17916938
M	29,5 cm	37,0 cm	PSF2-90-P 17916915	PSF2-110 17916944
L	32,5 cm	40,0 cm	PSF3-90-P 17916921	PSF3-110 17916973