

AFH Mini-Massage Vibrator | 4 Tools



Lieferumfang

- 1x AFH Mini Massage-Vibrator (ohne Batterie)
- vier verschiedene Massageaufsätze

Sicherheitshinweise

Der AFH Mini-Massage Vibrator ist wartungsfrei. Nicht verwenden, wenn das Gerät beschädigt ist oder Anzeichen von Fehlfunktionen zeigt. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich gemäß der vorgesehenen Bestimmung zur äußeren Massage.

Achtung: Bei Nichtgebrauch die Batterien aus dem Gerät entfernen. Und nicht im Hausmüll entsorgen (Sondermüllverordnung)

Reinigung Nach dem Gebrauch bitte die Batterie entnehmen und ggf. mit geeignetem Tuch reinigen.

Anwendung

1. Den AFH Mini-Massage Vibrator aus der Verpackung nehmen und überprüfen Sie das Gerät und die Aufsätze auf einen ordnungsgemäßen Zustand.
2. Drehen Sie den unteren Teil des Vibrators auf mit dem Pfeil auf „Open“ und ziehen Sie ihn vorsichtig ab.
3. Legen Sie eine AA-Mignon Batterie ein und verschließen Sie das Gerät.
4. Setzen Sie den gewünschten Aufsatz auf das Gerät.
5. Drehen Sie den unteren Teil des Vibrators nach rechts auf „ON“.
6. Beginnen Sie mit der Vibrationsmassage.
7. Jegliche Massagen mit diesem Gerät müssen schmerzfrei und wohltuend ausgeführt werden.

