



## Lieferumfang

- » 1 AFH Mini Vibrator
- » 8 unterschiedliche Aufsätze
- » 1 Schutzkappe
- » 1 Gebrauchsanweisung
- » 1 Aufbewahrungskarton



AFH Webshop® · Inhaber Rainer Zumhasch  
Pyrmonter Straße 50 · 32676 Lügde · Germany  
Tel.: +49 5281 98712-63 · info@premium-therapie.de  
[www.premium-therapie.de](http://www.premium-therapie.de)



Made in China



# AFH Mini-Vibrator 8.0 Deluxe

Punktmassager in 3 Stufen mit 8 Tools



Gebrauchsanweisung bitte vor dem ersten Gebrauch durchlesen und aufbewahren. Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit per Telefon 05281-9871263 oder E-Mail: info@premium-therapie.de an den AFH Webshop®.

## Technische Daten

### 3 Vibrationsgeschwindigkeiten

1. Stufe 1 leicht: 9500rpm, Strom 280mAh, Volt 3V
2. Stufe 2 mittel: 12400rpm, Strom 340mAh, Volt 3V
3. Stufe 3 stark: 14400rpm, Strom 420mAh, Volt 3V

## Reinigung

Der Mini-Vibrator 8.0 Deluxe ist vor jeder Anwendung feucht zu desinfizieren (bspw. Descosept Forte) und sollte anschließend mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Es sollte zudem in regelmäßigen Abständen eine zusätzliche Komplettreinigung mit Seifenlauge oder Spülmittel erfolgen (mit befeuchtetem Tuch und anschließend Trockenreiben mit einem Baumwolltuch).

## Wartung / Lagerung

Der AFH Mini-Vibrator 8.0 Deluxe ist wartungsfrei. Sollten sich Abnutzungserscheinungen, insbesondere der Zubehörteile / Aufsätze zeigen, so wenden Sie sich an Ihren Fachhändler und tauschen die Aufsätze aus. Das Gerät ist an einem trockenen sowie lichtgeschützten Ort aufzubewahren.



**Achtung:** Bei Nichtgebrauch die Batterien aus dem Gerät entfernen. Und nicht im Hausmüll entsorgen (Sondermüllverordnung).



## Indikation

Der AFH Mini-Vibrator 8.0 Deluxe ist in erster Linie konzipiert für punktuelle Massagen von kleinen Körperregionen (bspw. der Hand). 8 unterschiedliche Aufsätze sowie 3 einstellbare Intensitäten der Vibration bieten mannigfaltige Einsatzmöglichkeiten von gezielten Punkt- bis hin zu kleinen Flächenmassagen. Es kann die Durchblutung gezielt verbessern und den muskulären Tonus regulieren.

## Anwendung

1. Den AFH Mini-Vibrator 8.0 Deluxe aus der Verpackung nehmen und auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen.
2. Am Ende des Mini-Vibrators die Abdeckung des Batteriefachs aufschieben und mit 2 AAA – 1,5 Volt Batterien nach Kennzeichnung +/- bestücken. (Abbildung 1)
3. Entfernen Sie die Schutzkappe am Kopfende und setzen Sie den gewünschten Aufsatz in das Gerät (Abbildung 2)  
8 unterschiedlicher Aufsätze/Einsatzmodule stehen zur Verfügung (Abbildung 3)
4. Wählen Sie mittels des Startknopfs eines der 3 Geschwindigkeiten / Intensitäten aus und beginnen Sie mit der Vibrationsmassage punktuell oder in leichter Bewegung (bspw. kreisend) (Abbildung 4)
5. Jegliche Massagen mit diesem Gerät müssen schmerzfrei und wohltuend ausgeführt werden!



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4