

Mode d'emploi

Planche de bain Basic


N° commande 78058 100 68 cm

N° commande 78059 100 73 cm



Lisez attentivement les instructions avant utilisation, suivez-les et conservez-les soigneusement ! Cet outil ne doit être utilisé par des tiers qu'à condition d'avoir préalablement pris pleinement connaissance des informations fournies ci-dessous.

La planche de bain Basic aide les personnes à mobilité réduite ou souffrant de problèmes de dos. Elle permet de faire sa toilette en position assise au niveau du bord de la baignoire. En outre, elle sert d'étagère pratique pour les ustensiles de bain pendant l'utilisation. Pour un maniement confortable, cette planche de bain possède des perforations pour un meilleur drainage de l'eau et des coussinets antidérapants en caoutchouc sur le fond qui protègent également la baignoire contre les dommages.

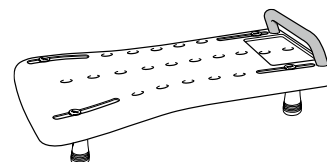

Indications/Contre-indications

Impossibilité de se tenir assis(e) en sécurité ou de s'asseoir dans la baignoire d'une atteinte à la fonction des membres inférieurs avec mobilité et force musculaire réduites ou supprimées, tout en conservant une posture stable du tronc et une fonction résiduelle suffisante des membres supérieurs.

⚠ Consignes de sécurité ⚠

- Les personnes pesant plus de 150 kg ne sont pas autorisées à utiliser la planche de bain Basic !
- Avant chaque utilisation, vérifiez que la planche de bain est bien fixée dans la position prévue et que la poignée et les repose-pieds sont fermement vissés !
- Lorsque vous ajustez les repose-pieds à la largeur de la baignoire, assurez-vous qu'ils appuient fermement sur le bord intérieur de la baignoire afin de garantir la stabilité de la planche de bain. Éviter que les pieds soient trop écartés du bord intérieur de la baignoire ou un appui trop serré.
- La planche de bain est idéale pour votre baignoire si elle ne dépasse pas le bord extérieur de la baignoire de plus de 2 cm par côté ou ses extrémités sont respectivement à 1 cm au maximum des côtés extérieurs de la baignoire.
- Ne vous balancez pas d'avant en arrière sur la planche de bain. De mouvements de basculement intenses pourraient faire se détacher la planche de bain !
- Ne vous penchez pas trop loin vers l'avant ou vers l'arrière. Une charge déséquilibrée pourrait faire se détacher la planche de bain !
- Les enfants ne doivent pas utiliser la planche de bain sans surveillance ou jouer avec en raison du risque de basculement !


Contenu

La planche de bain est fournie avec une poignée comprenant 2 vis, 4 repose-pieds comprenant 4 vis et 2 capuchons de protection pour les ouvertures lorsque vous n'utilisez pas la poignée ainsi qu'un mode d'emploi.

Montage


Poignée

Pour monter la poignée, placez-la dans les ouvertures de montage prévues à cet effet afin qu'elle pointe vers vous (ou à l'opposé de la paroi du mur) et vissez-la en place avec les vis fournies.

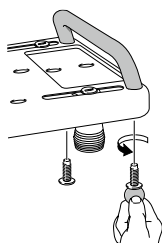


Capuchons de protection

Lorsque vous n'utilisez pas la poignée, fermez les ouvertures de montage dans la planche de bain avec les capuchons de protection pour les protéger de la contamination par des résidus de savon, etc.

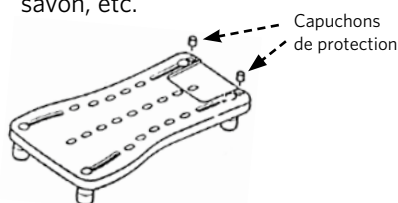

Repose-pieds de la planche de bain

Tout d'abord, vissez les quatre repose-pieds avec les vis appropriées de manière lâche afin de pouvoir encore les déplacer. Vous devez encore déterminer l'ajustement optimal dans la baignoire afin de pouvoir serrer complètement les vis. Voir la section « Montage de la planche de bain dans la baignoire ».

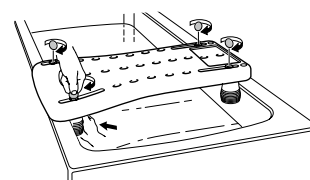


Montage de la planche de bain dans la baignoire

Pour ajuster la largeur souhaitée de la planche de bain, placez-la sur le bord de la baignoire. L'extrémité de la planche sans poignée pointe vers vous.


Les pieds étant seulement pré-montés, vous pouvez maintenant définir la largeur souhaitée : Celle-ci est entre 39 cm et 62,5 cm pour la référence 78058 100 ou entre 40 cm et 67 cm pour la référence 78059 100. Maintenant, serrez les vis pour fixer le réglage de la largeur.

Les repose-pieds de la planche de bain sont conçus de manière à offrir une adhérence optimale sur le bord de la baignoire si le réglage est correct.

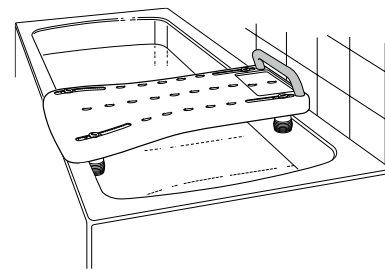

Utilisation

Placez la planche de bain Basic sur le bord de la baignoire de sorte que la poignée soit à l'extrémité opposée. Maintenant, asseyez-vous sur la planche de bain et tournez-vous dans la baignoire, placez vos jambes une par une. La toilette est plus facile en s'asseyant au milieu, qui est plus étroit. La poignée vous aide à entrer et à sortir et offre un soutien supplémentaire pendant l'utilisation. Si vous ne vous sentez toujours pas en sécurité, demandez l'aide d'une personne soignante.

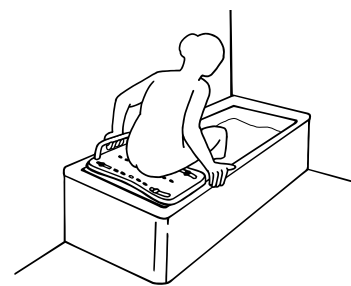

Nettoyage/désinfection

La planche de bain est destinée uniquement au contact avec la peau intacte. Pour le nettoyage manuel, utiliser un détergent non agressif pour les matériaux. La désinfection doit être effectuée avec un désinfectant de surface disponible dans le commerce et compatible avec les matériaux. La sélection et l'application de détergents et de désinfectants appropriés doivent être effectuées conformément aux spécifications du fabricant respectif.

Réutilisation/Maintenance

Le produit peut être réutilisé. Avant d'être réutilisé, il doit être nettoyé et désinfecté.

En outre, un spécialiste doit vérifier l'absence de dommages et approuver la réutilisation.

La planche de bain est sans entretien. Si vous remarquez éventuellement une usure, faites remplacer les composants par votre spécialiste.

Matériau

Tous les matériaux utilisés sont résistants ou protégés contre la corrosion.


- Planche de bain, poignée, vis : Polypropylène
- Pieds : Caoutchouc thermoplastique

Conservation

Ne conservez pas la planche de bain en extérieur.

Durée de vie

La durée de la planche de bain est de trois ans, avec une utilisation et un nettoyage quotidiens, si l'utilisation est conforme au mode d'emploi. Le produit peut être utilisé au-delà de cette période s'il n'est pas endommagé et ne présente pas de danger.

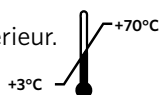

Élimination

Ne jetez pas simplement la planche de bain avec les ordures ménagères. Renseignez-vous au préalable auprès de votre entreprise communale de gestion des déchets sur la manière appropriée et écologique d'éliminer les déchets dans votre région.

Caractéristiques techniques

• Dimensions (L x l x H)

N° commande 78058 100 : 68,2 x 34,5 cm/28 x 3,5 cm (hors poignée)

N° commande 78059 100 : 73 x 34 cm/29,5 x 3,5 cm (hors poignée)

• Hauteur avec poignée : 11,5 cm

• Capacité de charge max.

N° commande 78058 100/78059 100: 150 kg

• Poids

N° commande 78058 100: 1,99 kg

N° commande 78059 100: 2,46 kg

MD Ce produit est conforme au règlement 2017/745/UE
relatif aux dispositifs médicaux et comporte un marquage CE. **CE**

Si un incident grave devait se produire en rapport avec ce dispositif médical, contactez le fabricant
de ce produit par e-mail à info@russka.de, ainsi que l'autorité compétente de votre pays.

 Producteur: Ludwig Bertram GmbH, Im Torfstich 7, 30916 Isernhagen, Allemagne, www.russka.de