

Gebrauchsanleitung – Catell Armschlinge Abduktion 30°



Catell empfiehlt, das Produkt durch einen lizenzierten oder anderweitig qualifizierten Gesundheitsfachmann anpassen zu lassen. Nutzer mit Diabetes, empfindlicher Haut, bekannten Kontaktallergien, eingeschränkter Sensibilität oder eingeschränkter Durchblutung müssen besonders vorsichtig sein und beim Tragen der Bandage besonders auf Einklemmen, Aufscheuern und Schwellungen achten. Überprüfen Sie immer den unten aufgeführten Inhalt. Wenden Sie sich an den verschreibenden Arzt oder Catell, wenn Sie Fragen zum Produkt haben.

Anwendungsgebiet

Die Bandage unterstützt und abduziert Arm und Schulter nach einer Verletzung oder einer Operation.

Anwendung

1. Legen Sie das Kissen um Ihre Hüfte und befestigen Sie es mit Haken, Schlaufe und Schnalle. Abbildung 1
2. Öffnen Sie den Haken und die Schlaufe der Armtasche und legen Sie den Arm hinein. Abbildung 2
3. Legen Sie den Hakenriemen mit den Schnallen auf Höhe des Handgelenks und den breiten kurzen Haken über die Öffnung der Tasche, nahe der Armbeugung. Abbildung 2 Riemen schließen
4. Ziehen Sie den fixierten Taschenriemen hinter Ihrem Rücken zur anderen Schulter. Drehen Sie die Schnalle hindurch und befestigen Sie den Haken am gleichen Riemen. Passen Sie die Riemenlänge sorgfältig auf die richtige Länge an. Abbildung 3
5. Wenn Sie zusätzliche Unterstützung der Hand brauchen, legen Sie den kurzen schmalen Riemen zwischen Daumen und Zeigefinger hindurch und befestigen Sie ihn an der Tasche
6. Vergewissern Sie sich, dass alle Gurte richtig befestigt sind.



Passen Sie die Bandage bei Bedarf an. Es ist wichtig, dass die Bandage angenehm und ohne Einklemmen, Scheuern oder Störung der Durchblutung sitzt.

Material

Nylon, Polyester, Polyätherschaum. Latexfrei.

Waschhinweise

Schließen Sie die Haken- und Schlaufenriemen. Befolgen Sie die folgenden Waschhinweise: Verwenden Sie ein Wäschenetz. Lassen Sie die Bandage abtropfen.



Hersteller Catell AB

Örkroken 23, SE-138 40 Älta, Schweden | Telefon: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

240416:5

Größe

Größe	*Abmessungen	Größe	*Abmessungen	Größe	*Abmessungen
S	28 - 33 cm	M	33 - 38 cm	L	38 - 43 cm

*Messen Sie die Länge des Unterarms. Die Maßangaben sind als Leitlinie zu sehen. Das Produkt kann beidseitig verwendet werden.

Für den Gebrauch durch einen Patienten.

Recycling

Trennen Sie Plastik und Textilgewebe. Entsorgen Sie die Bandage gemäß den lokalen Bestimmungen.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie 2017:745, Produktklasse 1.



Hersteller Catell AB

Örkroken 23, SE-138 40 Älta, Schweden | Telefon: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

240416:5