

Mode d'emploi – Écharpe d'abduction 30° Catell



Catell recommande que le produit soit ajusté et adapté par un professionnel de santé agréé ou autrement qualifié. Les utilisateurs souffrant de diabète, de peau sensible, d'allergies de contact connues, d'une sensibilité réduite ou d'une mauvaise circulation sanguine doivent être particulièrement attentifs et vérifier qu'ils ne souffrent pas de pincements, de frottements ou d'œdèmes lorsqu'ils utilisent le bandage. Vérifiez toujours le matériel contenu ci-dessous. Contactez votre médecin ou Catell si vous avez des questions sur le produit.

Zone d'utilisation

Le bandage permet de soutenir et de maintenir le bras et l'épaule de l'utilisateur en abduction après une blessure ou une intervention chirurgicale.

Indication

1. Attachez le coussin autour de la taille à l'aide de la sangle auto-agrippante et de la boucle à clipser. Image 1
2. Ouvrez les fermetures auto-agrippantes de l'écharpe de bras et placez l'avant-bras dans l'écharpe. Image 2
3. Faites entrer la sangle auto-agrippante dans les boucles au niveau du poignet et la sangle auto agrippante large et courte au niveau de l'ouverture de l'écharpe, près du coude du bras. Image 2 Fermez les bandes.
4. Tirez sur la sangle fixe derrière votre dos, en passant par-dessus l'épaule opposée. Passez la sangle à travers la boucle et attachez-la sur elle-même. Ajustez soigneusement la bonne longueur de sangle pour un meilleur soutien. Image 3
5. Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire pour la main, placez la sangle courte et étroite dans la sangle du pouce entre le pouce et l'index et attachez-la à l'écharpe. Image 3
6. Assurez-vous que toutes les ceintures sont correctement fixées.



Ajustez le bandage si nécessaire. Il est important que le bandage s'adapte parfaitement à l'avant-bras sans pincer, irriter ou empêcher la circulation sanguine.

Matériaux

Nylon, polyester, mousse de polyester. Sans latex.

Instructions de lavage

Fermez les bandes auto-agrippantes. Suivez les instructions de lavage ci-dessous. Utilisez une pochette de lavage. Laissez le bandage sécher à l'air libre.



Fabricant Catell AB

Örkroken 23, SE-138 40 Älta, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

240416:5

Taille

Taille	*Dimensions	Taille	*Dimensions	Taille	*Dimensions
S	28 - 33 cm	M	33 - 38 cm	L	38 - 43 cm

*Mesure de la longueur de l'avant-bras. Les mesures sont indiquées à titre indicatif. Le produit est interchangeable des deux côtés.
Utilisation sur un même patient.

Élimination

Séparez les plastiques et les textiles. Triez selon les réglementations locales.

Ce dispositif est conforme aux exigences de la réglementation sur les dispositifs médicaux 2017:745, classe de produit 1.



Fabricant Catell AB

Örkroken 23, SE-138 40 Älta, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

240416:5