

# Gebrauchsanweisung - Catell Buddy Loops – Fingerfixationsband



Catell empfiehlt, dass das Produkt von einer lizenzierten oder anderweitig qualifizierten Gesundheitsfachperson angepasst wird. Patienten mit Diabetes, empfindlicher Haut, bekannten Kontaktallergien, eingeschränkter Sensibilität oder Sensibilitätsstörungen oder schlechter Durchblutung sollten besonders aufmerksam sein und bei der Verwendung der Bandage auf Quetschungen, Scheuerstellen oder Ödeme achten. Prüfen Sie immer den Inhalt des untenstehenden Materials. Alle schwerwiegenden Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Produkt sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates gemeldet werden, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an Catell, wenn Sie Fragen zum Produkt haben.

## Anwendungsbereich

Die Bandage unterstützt die Finger des Anwenders nach Verletzungen, Operationen, chronischen Schmerzen sowie bei Arthrose, chronischen Krankheit oder Überlastungsproblemen. Die Bandage kann auch zu unterstützenden Zwecken bei repetitiven Bewegungen eingesetzt werden.

## Anwendung

1. Legen Sie Ihre Finger auf die Schlaufenseite des Bandes, einen auf jeder Seite der Haken. Bild 1
2. Legen Sie die Schlaufe um die Finger und befestigen Sie sie am Haken. Ziehen Sie das Band nicht zu fest an. Bild 2 und Bild 3
3. Schneiden Sie überschüssige Bänder ab.



Passen Sie die Klettbänder bei Bedarf an. Es ist wichtig, dass die Bandage bequem sitzt, ohne zu drücken, zu scheuern oder die Blutzirkulation zu beeinträchtigen.

## Material

Nylon. Latexfrei.

## Waschanleitung

Schließen Sie die Klettverschlussriemen. Befolgen Sie die nachstehenden Waschanweisungen. Verwenden Sie einen Waschbeutel. Lassen Sie die Bandage abtrocknen.



## Größen

Erhältlich in Breiten von 1,6 cm 2,5 cm 5 cm

Das Produkt ist beidseitig tragbar.

Verwendung für einen Patienten.

## Recycling

Entsorgung nach den örtlichen Vorschriften.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Medizinprodukteverordnung MDR 2017:745, Produktklasse 1.



Manufacturer Catell AB

Örkroken 23, SE-138 40 Älta, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

230416:3