

Mode d'emploi - Catell Buddy Loops – Bande d'immobilisation des doigts

Catell recommande que le produit soit adapté par un professionnel de santé agréé ou autrement qualifié. Les patients souffrant de diabète, de peau sensible, d'allergies de contact connues, d'une sensibilité réduite ou de troubles de la sensibilité ou d'une mauvaise circulation sanguine doivent être particulièrement vigilants et faire attention aux meurtrissures, aux frottements ou aux œdèmes lors de l'utilisation du bandage. Vérifiez toujours le contenu du matériel ci-dessous. Tout incident grave lié au produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient réside. Consultez votre médecin ou Catell si vous avez des questions sur le produit.

Domaine d'application

Le bandage soutient les doigts de l'utilisateur après des blessures, des opérations, des douleurs chroniques ainsi qu'en cas d'arthrose, de maladie chronique ou de problèmes de surmenage. Le bandage peut également être utilisé à des fins de soutien lors de mouvements répétitifs.

Inscription

1. Placez vos doigts sur le côté de la boucle de la bande, un de chaque côté des crochets. Image 1
2. Placez la boucle autour de vos doigts et fixez-la au crochet. Ne serrez pas trop la bande. Image 2 et Image 3
3. Coupez l'excédent de ruban.



Ajustez les bandes velcro si nécessaire. Il est important que le bandage soit confortable, sans serrer, sans frotter et sans gêner la circulation sanguine.

Matériaux

Nylon. Sans latex

Instructions de lavage

Fermez les sangles velcro. Suivez les instructions de lavage ci-dessous.
Utilisez un sac de lavage. Laissez le bandage s'égoutter.



Tailles

Disponible en largeurs de 1,6 cm 2,5 cm 5 cm

Ce produit est bilatéral.

Utilisation pour un patient.

Recyclage

Éliminer conformément à la réglementation locale.

Ce produit est conforme aux exigences de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux MDR 2017:745, classe de produit 1.



Manufacturer Catell AB

Örkroken 23, SE-138 40 Älta, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

220701:3