

Gebrauchsanleitung - Comfort Cool

Catell empfiehlt, das Produkt durch einen lizenzierten oder anderweitig qualifizierten Gesundheitsfachmann anpassen zu lassen. Nutzer mit Diabetes, empfindlicher Haut, bekannten Kontaktallergien, eingeschränkter Sensibilität oder eingeschränkter Durchblutung müssen besonders vorsichtig sein und beim Tragen der Bandage besonders auf Einklemmen, Aufscheuern und Schwellungen achten. Überprüfen Sie immer den unten aufgeführten Inhalt. Wenden Sie sich an den verschreibenden Arzt oder Catell, wenn Sie Fragen zum Produkt haben.

Anwendungsgebiet

Die Bandage stützt das Daumensattelgelenk und das Daumengrundgelenk nach Verletzungen, Operationen, bei chronischen Schmerzen, Osteoarthritis und Überanstrengung. Die Bandage kann auch zu präventiven Zwecken bei starken oder repetitiven Bewegungen verwendet werden.

Anwendung

1. Öffnen Sie die Haken- und Schlaufenriemen und legen Sie den Daumen in die Bandage.
Abbildung 1
2. Schließen Sie die Haken- und Schlaufenriemen auf dem Handrücken.
Abbildung 2
3. Halten Sie Ihr Handgelenk in Neutralstellung. Nehmen Sie den Daumenriemen und führen Sie ihn um den Daumenansatz und dann hoch zum Handrücken. Schließen Sie den Riemen. Stellen Sie sicher, dass der Haken und die Schlaufe sich einander überlappen und die Bandage bequem sitzt.
Abbildung 3



Länge und Weite am Daumen können durch Einschneiden des Materials angepasst werden. Schneiden Sie dabei nicht in den Saum. Passen Sie die Haken- und Schlaufenriemen bei Bedarf an. Es ist wichtig, dass die Bandage angenehm und ohne Einklemmen, Scheuern oder Störung der Durchblutung sitzt.

Material

Perforierten Neopren: synthetisches Gummi, Polyester, Polyamid. Latexfrei.

Waschhinweise

Schließen Sie die Haken- und Schlaufenriemen. Befolgen Sie die folgenden Waschhinweise: Verwenden Sie ein Wäschenetz. Lassen Sie die Bandage abtropfen.



Größe

Größe	*Abmessungen	Größe	*Abmessungen	Größe	*Abmessungen
XS	12 - 14 cm	M	16 - 18 cm	XL	20 - 22 cm
S	14 - 16 cm	L	18 - 20 cm	XXL	22 - 24 cm

*Messen Sie den Handgelenksumfang. Die Maßangaben sind als Leitlinie zu sehen. Für den Gebrauch durch einen Patienten. Wenn das Produkt Neopren enthält, wird eine maximale Tragedauer von 4 Stunden am Stück empfohlen.

Recycling

Entsorgen Sie die Bandage gemäß den lokalen Bestimmungen

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie 2017:745, Produktklasse 1.