

Catell recommande que le produit soit ajusté et adapté par un professionnel de santé agréé ou autrement qualifié. Les utilisateurs souffrant de diabète, de peau sensible, d'allergies de contact connues, d'une sensibilité réduite ou d'une mauvaise circulation sanguine doivent être particulièrement attentifs et vérifier qu'ils ne souffrent pas de pincements, de frottements ou d'œdèmes lorsqu'ils utilisent le bandage. Vérifiez toujours le matériel contenu ci-dessous. Contactez votre médecin ou Catell si vous avez des questions sur le produit.

Zone d'utilisation

Le bandage permet de soutenir les articulations du pouce (carpo-métacarpiennes et métacarpo-phalangiennes) de l'utilisateur après une blessure, une opération, une douleur chronique, de l'arthrose ou des problèmes de surmenage. Le bandage peut également être utilisé en prévention de mouvements lourds ou répétitifs.

Indication

1. Ouvrez les bandes auto-agrippantes et placez le pouce dans le bandage. Image 1
2. Fermez les bandes auto-agrippantes sur le dos de la main. Image 2
3. Maintenez votre poignet dans une position neutre. Prenez la sangle du pouce et placez-la autour de la base du pouce puis vers le haut sur le dos de la main, puis fermez la sangle de pouce. Assurez-vous que les parties auto-agrippantes coïncident et que le support de pouce soit confortable à porter. Image 3



La longueur et la largeur du pouce peuvent être ajustées en coupant le matériel mais en évitant les coutures. Ajustez les bandes auto-agrippantes si nécessaire. Il est important que le bandage s'adapte parfaitement à la main sans pincer, irriter ou empêcher la circulation sanguine.

Matériaux

Néoprène perforé : caoutchouc synthétique, polyester, polyamide. Sans latex.

Instructions de lavage

Fermez les bandes auto-agrippantes. Suivez les instructions de lavage ci-dessous. Utilisez une pochette de lavage. Laissez le bandage sécher à l'air libre.



Taille

Taille	*Dimensions	Taille	*Dimensions	Taille	*Dimensions
XS	12-14 cm	M	16-18 cm	XL	20-22 cm
S	14-16 cm	L	18-20 cm	XXL	22-24 cm

*Mesure de la circonférence du poignet. Les mesures sont indiquées à titre indicatif. Utilisation sur un même patient. Comme le produit contient du néoprène, il est recommandé de l'utiliser au maximum 4 heures d'affilées.

Élimination

Triez selon les réglementations locales.

Ce dispositif est conforme aux exigences de la réglementation sur les dispositifs médicaux 2017:745, classe de produit 1.