

Gebrauchsanleitung - Edema Handschuhe

Catell empfiehlt, das Produkt durch einen lizenzierten oder anderweitig qualifizierten Gesundheitsfachmann anpassen zu lassen. Nutzer mit Diabetes, empfindlicher Haut, bekannten Kontaktallergien, eingeschränkter Sensibilität oder eingeschränkter Durchblutung müssen besonders vorsichtig sein und beim Tragen der Bandage besonders auf Einklemmen, Aufscheuern und Schwellungen achten. Eine Kompressionsbehandlung ist gegebenenfalls unter bestimmten Bedingungen kontraindiziert, z. B. bei einer andauernden Infektion/Entzündung, Herzproblemen, Tumorerkrankungen, Nieren- oder Lebererkrankungen und peripherer Neuropathie. Bei Unsicherheiten fragen Sie einen Arzt. Überprüfen Sie immer den unten aufgeführten Inhalt. Wenden Sie sich an den verschreibenden Arzt oder Catell, wenn Sie Fragen zum Produkt haben.

MODELL	KOMPRESSIONSKLASSE	ART.-NR.	MODELL	GRÖÖE	* ABMESSUNGEN
Catell Ödemhandske Dreiviertelfinger	1 - 2 (15 - 25 mmHg)	5050	Nur für EDEMA	XXS	13 - 15 cm
Catell Ödemhandske Ganzfinger	1 - 2 (15 - 25 mmHg)	6050	Catell Ödemhandske, EDEMA	XS	15 - 18 cm
EDEMA Light Dreiviertelfinger	1 - 2 (15 - 25 mmHg)	7050, 7051	Alle Modelle	S	18 - 20 cm
EDEMA Light Ganzfinger	1 - 2 (15 - 25 mmHg)	7150, 7151	Alle Modelle	M	20 - 22 cm
EDEMA Light Long Ganzfinger	1 - 2 (15 - 25 mmHg)	7160	Alle Modelle	L	22 - 24 cm
EDEMA More Dreiviertelfinger	2 (23 - 32 mmHg)	8050, 8051	Nur für EDEMA	XL	24 - 27 cm
EDEMA More Ganzfinger	2 (23 - 32 mmHg)	8150, 8151			

*Messen Sie den Umfang des Daumensattelgelenks. Die Maßangaben sind als Leitlinie zu sehen.

Hinweis – EDEMA ist beidseitig verwendbar. Catell Ödemhandske ist für Links oder Rechts erhältlich.

Eigenschaften

Außenliegende Nähte zur Minimierung des Drucks an empfindlichen Stellen.

Verwenden Sie Handschuhe

- um Schwellungen zu verringern, wie vom verschreibenden Arzt empfohlen.
- Mit außenliegenden Nähten.

Wenden Sie sich an den verschreibenden Arzt, wenn

- die Schwellung zunimmt.
- der Handschuh ein Taubheitsgefühl verursacht.
- der Handschuh Schmerzen verursacht.

Waschhinweise

Befolgen Sie die folgenden Waschhinweise: Verwenden Sie ein Wäschenetz. Lassen Sie die Bandage waagrecht trocknen.



Für den Gebrauch durch einen Patienten.

Material

Nylon, Lycra. Latexfrei.

Recycling

Entsorgen Sie die Bandage gemäß den lokalen Bestimmungen

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie 2017:745, Produktklasse 1.