

Gebrauchsanweisung - Fingerstrumpf

Catell empfiehlt, das Produkt durch einen lizenzierten oder anderweitig qualifizierten Gesundheitsfachmann anpassen zu lassen. Nutzer mit Diabetes, empfindlicher Haut, bekannten Kontaktallergien, eingeschränkter Sensibilität oder eingeschränkter Durchblutung müssen besonders vorsichtig sein und beim Tragen der Bandage besonders auf Einklemmen, Aufscheuern und Schwellungen achten. Überprüfen Sie immer den unten aufgeführten Inhalt. Wenden Sie sich an den verschreibenden Arzt oder Catell, wenn Sie Fragen zum Produkt haben.

Modell	Kompressionsklasse	Art.-Nr.	Größe	*körperferner Umfang	*körpernaher Umfang
Finger Light	1 - 2 (15 - 25 mmHg)	7250	XS	30 mm	50 mm
Finger More	2 (23 - 32 mmHg)	8250	S	40 mm	60 mm
			M	50 mm	70 mm
			L	60 mm	80 mm
			XL	70 mm	90 mm

*Die Maßangaben sind als Leitlinie zu sehen.

Länge des Strumpfs: 10 cm

Eigenschaften

Außenliegende Nähte zur Minimierung des Drucks an Stellen.

Verwenden Sie den Strumpf,

- um Schwellungen zu verringern, wie vom verschreibenden Arzt empfohlen.
- Mit außenliegenden Nähten.

Wenden Sie sich an den verschreibenden Arzt, wenn

- die Schwellung zunimmt.
der Strumpf ein Taubheitsgefühl verursacht. der Strumpf Schmerzen verursacht.

Material

Nylon, Lycra. Latexfrei.

Waschhinweise

Befolgen Sie die folgenden Waschhinweise: Verwenden Sie ein Wäschenetz. Lassen Sie die Bandage waagrecht trocknen.



Für den Gebrauch durch einen Patienten.

Recycling

Entsorgen Sie die Bandage gemäß den lokalen Bestimmungen

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie 2017:745, Produktklasse 1.