

Mode d'emploi – Orthèses de poignet


Catell recommande que le produit soit ajusté et adapté par un professionnel de santé agréé ou autrement qualifié. Les utilisateurs souffrant de diabète, de peau sensible, d'allergies de contact connues, d'une sensibilité réduite ou d'une mauvaise circulation sanguine doivent être particulièrement attentifs et vérifier qu'ils ne souffrent pas de pincements, de frottements ou d'œdèmes lorsqu'ils utilisent l'orthèse. Vérifiez toujours le matériel contenu ci-dessous. Contactez votre médecin ou Catell si vous avez des questions sur le produit.

Zone d'utilisation

L'orthèse permet de soutenir la main, le poignet et l'avant-bras de l'utilisateur après une blessure, une opération, une douleur chronique, de l'arthrose ou des problèmes de surmenage. L'orthèse peut également être utilisée à des fins préventives pour les mouvements lourds ou répétitifs.

Indication

1. Si l'orthèse est munie d'une attelle droite, sortez-la de son étui et pliez-la en fonction de la forme et de l'angle de la main de l'utilisateur et de ses besoins. Puis, remettez-la dans l'étui pour attelle. La bosse de l'attelle doit être tournée vers la paume de la main. Image 1
2. Ouvrez toutes les bandes auto-agrippantes, puis fermez l'attache du pouce. Placez votre main dans l'attelle comme indiqué sur l'image 2 ou 4.
3. Fermez toutes les bandes auto-agrippantes et ajustez-les de manière que l'attelle soit confortable. Image 3 ou 5

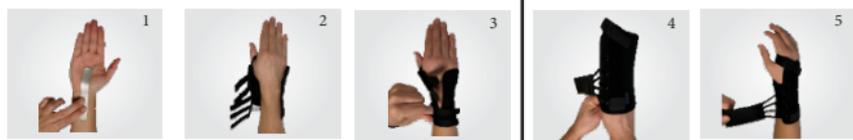

Coupez l'excédent des bandes auto-agrippantes pour obtenir une finition plus propre et plus nette. Ajustez les bandes auto-agrippantes si nécessaire. Il est important que l'orthèse s'adapte parfaitement à la main sans pincer, irriter ou empêcher la circulation sanguine.

Matériaux

Strong : nylon, élasthanne. **Stabil** : coton, polyester, élasthanne. **Comfort** : coton, polyamide, polyester, élasthanne. **Neopren** : caoutchouc synthétique, polyester, polyamide. **Soft** : polyester, viscose, élasthanne, nylon. Sans latex.

Instructions de lavage

Fermez les bandes auto-agrippantes et, si l'orthèse dispose d'une attelle, retirez-la de l'étui pour attelle. Suivez les instructions de lavage ci-dessous. Utilisez une pochette de lavage. Laissez l'orthèse sécher à l'air libre.



Taille

Taille	*Dimensions	Taille	*Dimensions	Taille	*Dimensions
XXS	10-12 cm	M	16-18 cm	XL	20-22 cm
XS	12-14 cm	L	18-20 cm	XXL	22-24 cm
S	14-16 cm				

*Mesure de la circonférence du poignet. Les mesures sont indiquées à titre indicatif. Utilisation sur un même patient. Si le produit contient du néoprène, il est recommandé de l'utiliser au maximum 4 heures d'affilées.

Élimination

Si le produit comprend une attelle amovible, retirez-la et éliminez-la conformément aux réglementations locales.

Ce dispositif est conforme aux exigences de la réglementation sur les dispositifs médicaux 2017:745, classe de produit 1.