

# Gebrauchsanweisung

Catell empfiehlt, dass das Produkt von einer lizenzierten oder anderweitig qualifizierten Gesundheitsfachperson angepasst wird. Patienten mit Diabetes, empfindlicher Haut, bekannten Kontaktallergien, eingeschränkter Sensibilität oder schlechter Durchblutung müssen besonders aufmerksam sein und auf Quetschungen, Scheuerstellen oder Ödeme achten, wenn sie die Bandage benutzen. Prüfen Sie immer den Inhalt des untenstehenden Materials. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an Catell, wenn Sie Fragen zum Produkt haben.

## Anwendungsbereich

Die Bandage unterstützt die Hand und die Finger des Patienten nach Verletzungen, Operationen, chronischen Schmerzen, Spastiken und/oder Krankheit. Die Bandage kann auch zu präventiven Zwecken eingesetzt werden.

## Anwendung

1. Wenn das Band der Bandage geschlossen ist, fädeln Sie das Band über den Handrücken und wickeln Sie die Hand um die Bandage gemäss Abbildung 1.
2. Ist das Produkt mit Klettverschlüssen versehen, öffnen Sie diese und legen Sie Ihre Hand gemäss Abbildung 2 in die Bandage.
3. Schliessen Sie alle Klettverschlüsse so, dass sich der harte und der weiche Teil gegenseitig bedecken und die Bandage bequem sitzt Abbildung 3
4. Wenn Sie ein kegelförmiges Produkt verwenden, kann die Kegelform genutzt werden, um den Öffnungsgriff im Daumen zu erhöhen, Abbildung 4



Schneiden Sie überschüssige Klettbänder ab, um ein sauberes und ordentliches Aussehen zu erhalten. Passen Sie die Klettbänder bei Bedarf, wenn nötig an. Es ist wichtig, dass die Bandage bequem sitzt und nicht drückt, scheuert oder die Blutzirkulation beeinträchtigt.

## Material

**Palm Grip/Finger Contracture:** Frottee, Baumwolle. **Palm Cone:** Frottee, Kunststoffkegel.

Alle Materialien sind latexfrei.

## Waschanleitung

Schliessen Sie die Klettverschlüsse und nehmen Sie die Schiene, falls vorhanden, aus der Schienentasche. Befolgen Sie die nachstehenden Waschanweisungen. Verwenden Sie einen Waschbeutel. Lassen Sie die Bandage abtropfen.



## Grösse

Modell	Art#	Grösse	Abmessungen des Kissens/Kegels
Palm Grip	6507	Small	11 x 6 cm
Palm Grip	6508	Large	13 x 7 cm
Palm Cone	5608	One size	13 cm
Finger Contracture	6560	One size	15 x 9 cm

Verwendung für einen Patienten.

## Recycling:

Entsorgung nach den örtlichen Vorschriften.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Medizinprodukteverordnung 2017:745, Produktklasse 1.