

## Mode d'emploi

# Enfile-bas tissu éponge

Art.-N° 26013 000

HMV-N° 02.40.01.2016



**Lisez attentivement ce mode d'emploi avant utilisation, suivez les instructions et conservez-le soigneusement !**

## Indication/Contre-indication

Cet enfile-bas permet aux personnes à mobilité réduite de mettre plus facilement des bas. Il évite une forte flexion de la hanche et réduit ainsi également un risque possible de chute. La forme flexible s'adapte confortablement à la jambe.

Les deux cordons coulissants intégrés avec poignées en boucle permettent également l'utilisation de enfile-bas d'une seule main. L'extérieur est fait de tissu éponge, dont la structure rugueuse maintient solidement le bas jusqu'à ce qu'il repose sur le pied. À l'intérieur, l'enfile-bas est équipé d'une doublure en nylon pour éviter les frottements désagréables lors du serrage.





L'enfile-bas ne convient pas pour mettre des bas de compression. L'enfile-bas ne doit pas non plus être utilisé par des personnes souffrant de troubles de la perception, de troubles graves de l'équilibre et d'incapacité à s'asseoir. L'utilisateur doit avoir des capacités perceptuelles et physiques suffisantes pour pouvoir utiliser l'enfile-bas.

### ⚠ Consignes de sécurité ⚠

- N'utilisez jamais un produit défectueux. Les produits qui montrent des signes d'usure doivent être éliminés !
- Utilisez toujours l'enfile-bas en position assise pour éviter le risque de chute.
- N'exposez pas l'enfile-bas à de grandes sources de chaleur pour éviter toute déformation.

## Application

1. Asseyez-vous sur un lit ou une chaise. Étirez le bas sur les trois langues en plastique. Veillez à ce que le bas soit tiré sur les languettes en plastique autant que possible jusqu'à l'extrémité du bas (Fig. 1).
2. Pour s'habiller, le côté avec un tissu éponge doit pointer vers l'extérieur (Fig. 2). Gardez les cordons coulissants à portée de main afin de pouvoir les utiliser pour les mettre immédiatement.
3. Le côté lisse de la coquille est maintenant appliqué sur le pied.
4. Appliquez l'enfile-bas de manière à ce qu'il soit aussi proche que possible du pied. Maintenant, glissez soigneusement votre pied dans le bas surélevé jusqu'à ce que votre pied soit complètement dans la coquille (Fig. 3).
5. Saisissez maintenant une ou les deux boucles de maintien et tirez lentement et prudemment l'enfile-bas vers le haut de la jambe, jusqu'à ce que le bas soit placé au-dessus du mollet. N'essayez pas de trop étirer le bas – ne le tirez pas trop vers le haut.
6. Maintenant, retirez soigneusement l'enfile-bas.

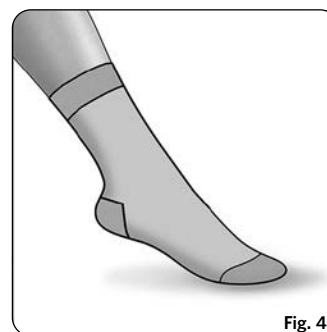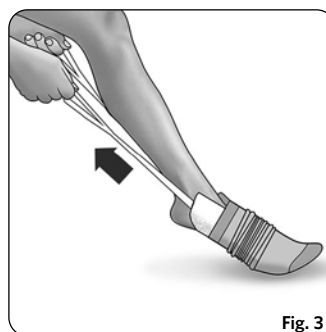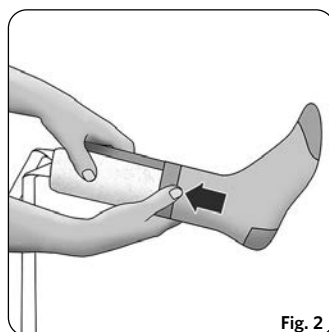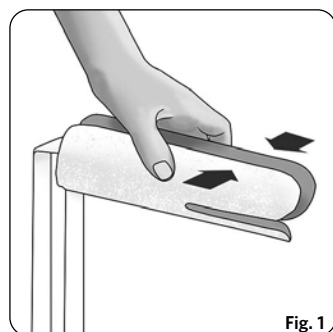


## Nettoyage

Laver à la main avec un détergent doux à un maximum de 40 °C.

Non lavable en machine.



## Stockage

Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'enfile-bas doit être conservé au sec. 

## Matériau

- Coque et cordon de serrage : Polypropylène
- Référence : 100 % coton (extérieur), 100 % polyester (intérieur)

## Élimination

Dans les ordures ménagères.

## Caractéristiques techniques

### Coquille

- Longueur : env. 22,5 cm
- Largeur couchée à plat : env. 18 cm
- Largeur en forme : env. 11,5 cm

### Cordons coulissants avec boucle intégrée

- Longueur : 72,5 x 2,5 cm (L x l) chacun
- Longueur de la boucle : env. 11,5 cm
- Longueur totale (coque avec cordons coulissants) : 95 cm
- Poids : env. 83 g

**MD** Ce produit est conforme au règlement 2017/745/UE  
relatif aux dispositifs médicaux et comporte un marquage CE.



Si un incident grave devait se produire en rapport avec ce dispositif médical, contactez le fabricant de ce produit par e-mail à [info@russka.de](mailto:info@russka.de), ainsi que l'autorité compétente de votre pays.



Producteur: Ludwig Bertram GmbH, Im Torfstich 7, 30916 Isernhagen, Allemagne, [www.russka.de](http://www.russka.de)