

Gebrauchsanleitung

Duschhocker Standard

Art.-Nr. 78030 000



Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf! Wird dieses Hilfsmittel von anderen Personen verwendet, müssen diese vor der Benutzung über die hier angegebenen Hinweise vollständig informiert werden.

Indikation/Kontraindikation

Der Duschhocker Standard unterstützt bewegungseingeschränkte Personen bei der täglichen Hygiene in der Dusche. Er fördert somit die Eigenständigkeit und Sicherheit. Bei Nichtgebrauch kann der Duschhocker aufgrund seines geringen Gewichts leicht und bequem aus der Duschkabine entfernt werden.

Die Benutzung des Duschhockers setzt die Fähigkeit voraus, noch eigenständig sitzen zu können. Der Duschhocker darf nicht benutzt werden, wenn Sie nicht mehr in der Lage sind, Ihr Gleichgewicht im Sitzen zu kontrollieren!

⚠ Sicherheitshinweise ⚠

- Benutzer, die schwerer als 150 kg sind, dürfen den Duschhocker nicht benutzen!
- Wenn Sie den Duschhocker montiert haben, stellen Sie vor dem ersten Gebrauch die Stabilität des Duschhockers sicher und vergewissern Sie sich, dass alle Stuhlbeine in der gleichen Sitzhöhe eingestellt sind.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Duschhocker fest und sicher in der Duschkabine steht.
- Achtung Sturzgefahr! Hocker nur von oben belasten! Auf dem Hocker sitzend
 - nicht auf der Sitzfläche herumrutschen!
 - nicht den Hocker nach vorn oder hinten schieben!
 - nicht nach vorn, hinten oder zur Seite lehnen!
 - nicht kippen!
- Stehen sowie Knien auf der Sitzfläche ist strengstens untersagt!
- Kinder sollten nicht die Möglichkeit haben, unbeaufsichtigt mit dem Duschhocker zu spielen!

Montage/Einstellung der Sitzhöhe

Der Duschhocker wird vormontiert geliefert. Vor der ersten Benutzung muss die entsprechende Sitzhöhe eingestellt werden. Dazu ziehen Sie am unteren Teil der Stuhlbeine, bis der Federstift in dem Loch einrastet, das der gewählten Sitzhöhe entspricht. Achten Sie darauf, dass Sie für alle 4 Stuhlbeine die gleiche Höheneinstellung wählen!

Reinigung/Desinfektion

Dieser Duschhocker ist nur für den Kontakt mit intakter Haut bestimmt. Für die manuelle Reinigung ist ein materialschonender Reiniger zu verwenden. Die Desinfektion ist mit einem DGHM/VAH-gelisteten, materialverträglichen Desinfektionsmittel durchzuführen. Die Auswahl und Anwendung geeigneter Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist entsprechend den jeweiligen Herstellerangaben vorzunehmen.

Material

- Sitz: Kunststoff
- Stuhlbeine: Aluminium
- Fußkapseln: Gummi

Entsorgung

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den regionalen Entsorgungsvorschriften.

Technische Daten

- Durchmesser Sitzfläche: 32,5 cm
- Sitzhöhe: 5-fach verstellbar in 2,5 cm-Schritten auf eine Sitzhöhe zwischen 44 und 54 cm
- Gesamtgewicht: 1,6 kg
- Fußkapseln: Ø 5,5 cm
- Maximale Belastbarkeit: 150 kg

Dieses Produkt entspricht der Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte und trägt eine CE-Kennzeichnung.

Sollte es im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt zu einem schwerwiegenden Vorfall kommen, kontaktieren Sie den Hersteller dieses Produktes unter info@russka.de sowie die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Deutschland: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM, www.bfarm.de.

Österreich: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen BASG, www.basg.gv.at.

Schweiz: Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic, www.swissmedic.ch.

Weitere Produkte finden Sie im Internet unter **www.russka.de**

