

Mode d'emploi

Tabouret de douche Standard

art. no 78030 000



Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation. Suivre les indications et les conserver précieusement! Si cette aide est utilisée par d'autres personnes, celles-ci doivent être bien informées sur les conseils suivant avant toute utilisation.

Le tabouret de douche Standard apporte son soutien aux personnes à mobilité réduite pour l'hygiène quotidienne dans la douche. Il favorise ainsi l'autonomie et la sécurité. En raison de son faible poids, le tabouret de douche peut être aisément retiré de la cabine de douche lorsqu'il n'est pas utilisé.

⚠️ Consignes de sécurité ⚠️

- Les utilisateurs de plus de 150 kg ne doivent pas utiliser le tabouret de douche !
 - L'utilisation du tabouret de douche présuppose la capacité de pouvoir encore se tenir assis tout(e) seul(e). Le tabouret ne doit pas être utilisée si vous n'êtes plus à même de contrôler votre équilibre en position assise !
 - Une fois que vous avez monté le tabouret de douche, assurez-vous avant la première utilisation que le tabouret de douche est stable et vérifiez que tous les pieds du tabouret sont réglés sur la même hauteur d'assise.
 - Assurez-vous avant chaque utilisation que le tabouret de douche est posé dans la douche de manière fixe et sûre.
 - Attention ! Risque de chute ! Ne charger le tabouret que verticalement, par le haut !
- En position assise sur le tabouret
 - ne pas se trémousser sur le siège !
 - ne pas pousser le tabouret vers l'avant ou vers l'arrière !
 - ne pas se pencher vers l'avant, vers l'arrière ou sur le côté !
 - ne pas se balancer !
 - Ne modifiez pas l'ajustement en hauteur du tabouret de douche pendant que vous êtes assis dessus !
 - Utilisez le tabouret de douche uniquement conformément aux spécifications, mais pas comme échelle de remplacement ou comme jouet !
 - En raison du risque de dérapage, les enfants ne doivent pas utiliser le tabouret de douche sans surveillance !

Montage/Réglage de l' hauteur

Le tabouret de douche est livré à l'état prémonté. Avant la première utilisation, la hauteur d'assise correspondante doit être réglée. Pour cela, tirez sur la partie inférieure des pieds du tabouret jusqu'à ce que la tige sur ressort se bloque dans le trou correspondant à la hauteur d'assise choisie. Veuillez impérativement à choisir le même ajustement en hauteur pour les 4 pieds du tabouret!

Nettoyage/Désinfection

Le dispositif médical est destiné uniquement au contact avec une peau intacte. Pour le nettoyage manuel, utiliser un nettoyant ménageant les matériaux. La désinfection doit être exécutée avec un désinfectant de surface compatible avec les matériaux et contenu dans les listes DGHM/VAH. Le choix et l'application de nettoyants et de désinfectants appropriés doivent être effectués en concordance avec les indications de chaque fabricant.

Matériau

- Siège : matière plastique
- Pieds du tabouret : aluminium
- Capuchons pieds : caoutchouc

Traitement des déchets

Veuillez mettre au rebut ce produit en conformité avec vos directives régionales.

Caracteristiques techniques

- Diametre du siège: 32,5 cm
- Hauteur du siège: ajustable sur 5 niveaux différents par étapes de 2,5 cm respectivement, pour une hauteur d'assise comprise entre 44-54 cm
- Poids total : 1,6 kg
- Embouts : Ø 5,5 cm
- Charge max. : 150 kg

Ce produit est conforme au règlement 2017/745/UE relatif aux dispositifs médicaux et comporte un marquage CE.

Si un incident grave devait se produire en rapport avec ce dispositif médical, contactez le fabricant de ce produit par e-mail à info@russka.de, ainsi que l'autorité compétente, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ANSM, www.ansm.sante.fr.

