

Mode d'emploi

Poignée d'appui rabattable

N° commande 78083 000	60 cm, laquée
N° commande 78083 100	80 cm, laquée
N° commande 78083 200	60 cm, acier inoxydable poli
N° commande 78083 300	80 cm, acier inoxydable poli



Lisez attentivement ce mode d'emploi avant utilisation, suivez les instructions et conservez-le soigneusement ! Cet outil ne doit être utilisé par des tiers qu'à condition d'avoir préalablement pris pleinement connaissance des informations fournies ci-dessous.

Cette poignée d'appui rabattable en étrier sert d'aide aux personnes à mobilité réduite lorsqu'elles s'assoient et se lèvent et les aide à maintenir leur indépendance. Elle peut être placée à côté du lavabo ou des toilettes. La fixation peut se faire à droite, à gauche ou, si nécessaire, des deux côtés. La poignée d'appui peut être rabattue après usage. La protection antichute intégrée empêche que la poignée se rabatte de manière intempestive.

Indication

Faiblesse/déficience fonctionnelle des membres inférieurs liée à la maladie avec une fonctionnalité encore suffisante des membres supérieurs permettant la position debout indépendante et de s'asseoir et se lever à l'évier et aux toilettes.

Contre-indication

Faiblesse/déficience fonctionnelle des membres inférieurs et supérieurs, de sorte que la station debout à l'évier et le fait de se lever des toilettes ne sont plus possibles.

⚠ Consignes de sécurité ⚠

- La capacité de charge maximale est de 110 kg !
- Utilisez la poignée d'appui rabattable uniquement en parfait état de fonctionnement !
- Lorsque la poignée est rabattue, veiller à ce que personne (en particulier des enfants) ne se trouve en-dessous - risque d'accident !
- L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié, seul en mesure d'identifier d'éventuels points faibles dans le mur et de sélectionner le matériau de montage approprié une fois que l'adéquation du mur a été établie.
- Utilisez la poignée d'appui rabattable uniquement de la manière décrite dans le mode d'emploi : elle ne peut servir de jouet !
- Les enfants ne doivent pas utiliser la poignée d'appui rabattable sans surveillance.

Contenu

La livraison comprend 1 poignée d'appui rabattable, 1 mode d'emploi et 1 carton d'emballage et de transport. Vérifiez le contenu de l'emballage. En cas de défauts reconnaissables ou de pièces manquantes, veuillez contacter votre revendeur spécialisé.

Montage

L'adéquation du montage mural de la poignée d'appui rabattable doit être déterminée par un spécialiste. Le montage doit également être effectué par un spécialiste !

La surface de fixation dans toute la zone de la plaque murale doit être plane et ne pas avoir de points faibles. En plus du choix du matériau de fixation adapté à l'état du mur, les spécifications du fabricant des chevilles doivent être respectées.

Le montage doit être effectué de manière à ce que l'utilisateur puisse s'appuyer complètement et en toute sécurité dessus, donc ni trop près ni trop loin des toilettes.

Sélectionnez le diamètre du trou en fonction du matériau de fixation. Les trous de vis de la plaque de vissage ont un diamètre de 0,9 cm.

1. Vérifiez la structure des murs !
2. Marquage horizontal et perçage des 4 trous.
3. Enfoncez les chevilles et vissez la poignée d'appui.

Utilisation

La poignée d'appui rabattable possède deux longerons de poignée. On s'appuie sur le longeron supérieur pour s'asseoir et sur le longeron inférieur pour se lever.

Levage: Soulevez la poignée d'appui depuis sa position horizontale jusqu'à sa position verticale la plus élevée. Le verrouillage se fait automatiquement dans cette position.

Abaissement: Soulevez la poignée d'appui d'environ un centimètre pour déverrouiller et accompagnez le mouvement jusqu'à l'horizontale.

Nettoyage/désinfection

La poignée d'appui rabattable est destinée au contact avec une peau intacte. Pour le nettoyage manuel, utiliser un nettoyeur non agressif pour les matériaux. La désinfection doit être effectuée avec un désinfectant de surface compatible avec les matériaux et répertorié DGHM/VAH. La sélection et l'application de détergents et de désinfectants appropriés doivent être effectuées conformément aux spécifications du fabricant respectif.

Entretien

La poignée d'appui rabattable est sans entretien. Il suffit de vérifier régulièrement l'intégrité de l'ensemble de la poignée d'appui rabattable ainsi que la bonne fixation au mur.

Changement de patient

Le produit peut être réutilisé. Il doit être nettoyé et désinfecté conformément aux instructions. En outre, un spécialiste doit vérifier l'absence de dommages et approuver la réutilisation.

Élimination

Ne jetez pas simplement la poignée d'appui rabattable avec les ordures ménagères. Renseignez-vous au préalable auprès de votre entreprise communale de gestion des déchets sur la manière appropriée et écologique d'éliminer les déchets dans votre région.

Matériau

Étrier de poignée d'appui rabattable, plaque murale : Acier inoxydable poli ou laqué.

Caractéristiques techniques

- Dimensions de la plaque murale : 10,3 x 20 cm (L x l)
- Dimensions étrier : 60 ou 80 x 15 cm
- Tube en acier inoxydable : Ø 2,4 cm
- Capacité de charge max. : 110 kg
- Poids : 60 cm : 2,4 kg
80 cm : 2,8 kg

 Ce produit est conforme au règlement 2017/745/UE relatif aux dispositifs médicaux et comporte un marquage CE.



Si un incident grave devait se produire en rapport avec ce dispositif médical, contactez le fabricant de ce produit par e-mail à info@russka.de, ainsi que l'autorité compétente de votre pays.

 Producteur: Ludwig Bertram GmbH, Im Torfstich 7, 30916 Isernhagen, Allemagne, www.russka.de