

HENROCUP®



MANUEL DE L'UTILISATEUR

HENROCUP® ET SON COUVERCLE

MARS 2023

Table des matières

Informations importantes.....	3
Usage prévu	3
Stockage	3
Mode d'emploi	4
Précautions	4
Utilisation quotidienne.....	4
Avertissements.....	5
Élimination respectueuse de l'environnement	5
Fiche technique HenroCup®.....	6
Fiche technique du couvercle	7

Informations importantes

Avant d'utiliser HenroCup®, veuillez lire ces instructions attentivement.

Usage prévu

HenroCup® est conçu et destiné uniquement pour la nourriture et les boissons.

HenroCup® a été développé par des ergothérapeutes danois dans le but de garantir un GOBELET de haute qualité pour les personnes souffrant d'une perte de force et de troubles de la coordination. HenroCup® ne contient pas de BPA et peut être utilisé en toute sécurité par les enfants de moins de 3 ans.

HenroCup® est conçu avec 2 larges poignées pour permettre une prise en main ferme. La forme du gobelet et des poignées permet de boire sans fléchir le cou. Le fond du gobelet est large, ce qui lui permet de rester stable sur la table et réduire les risques de déversements.

Stockage

À conserver au sec, à température ambiante et à l'abri du soleil.

Mode d'emploi

Contenu : 1 HenroCup® peut être livré avec ou sans couvercle.

1. Déballez le gobelet et le couvercle, puis jetez l'emballage de manière appropriée.
2. Avant toute utilisation, lavez le gobelet et le couvercle.
3. Le HenroCup® est maintenant prêt à l'emploi.

Précautions

Après avoir déballé le gobelet, lavez systématiquement le HenroCup® avant toute utilisation.

Le gobelet est destiné à être utilisé pour des boissons.

Les boissons chaudes peuvent provoquer une décoloration et réduire la durée de vie du gobelet.

Ne chauffez pas le gobelet à la chaleur d'une bougie ou d'un feu.

Soyez prudent avec les liquides chauds.

Si vous l'utilisez avec son couvercle, assurez-vous que le couvercle est correctement mis en place et qu'il n'est pas desserré avant toute utilisation.

Utilisation quotidienne

Le HenroCup® peut être lavé au lave-vaisselle jusqu'à 65°C.

Cependant, le gobelet peut ternir et sa qualité se détériorer ; il est donc recommandé de le laver à la main.

HenroCup® peut supporter des températures comprises entre -20° C et 95° C.

Avertissements

N'utilisez pas de liquide dont la température dépasse 95 °C dans le HenroCup®.



VEUILLEZ NOTER QUE CERTAINES BOISSONS PEUVENT ENGENDRER UN CHANGEMENT DE COLORATION DE L'INTÉRIEUR DU GOBELET.

Jetez le HenroCup® si sa surface n'est plus lisse au toucher et prend une couleur blanche laiteuse.

Élimination respectueuse de l'environnement

Veillez jeter le gobelet d'une manière neutre à l'égard de l'environnement et respectueuse de celui-ci.



Le HenroCup® est fabriqué à partir de matériaux qui doivent être recyclés. Veuillez donc jeter le HenroCup® usagé par le biais des systèmes de collecte de déchets appropriés.



SI VOUS AVEZ UN DOUTE SUR LE MEILLEUR MOMENT DE JETER LE HenroCup®, VOUS POUVEZ ENVOYER UN COURRIEL À HENROTEK@HENROTEK.COM

Fiche technique HenroCup®	
Matériau	PC (Polycarbonate)
Poids	139,2 g
Hauteur	9 cm
Largeur	15 cm
BPA	HenroCup® ne contient pas de BPA et peut être utilisé en toute sécurité par les enfants de moins de 3 ans.
Marqué	CE
Couleur	Transparent avec ml, transparent, rouge, vert, bleu
Millilitres	230 ml
Lave-vaisselle	65°C
Micro-ondable	Oui
N° UDI-DI de base	57048311BU
UDI-DI HENROCUP® Transparent avec ml	05704831128777
UDI-DI HENROCUP® Vert	05704831128784
UDI-DI HENROCUP® Rouge	05704831238791
UDI-DI HENROCUP Transparent	05704831128890
UDI-DI HENROCUP® Bleu	05704831128999
Normes et réglementations	Règlement (CE) 1935/2004 du 27 octobre 2004 Règlement (CE) 2023/2006 du 22 décembre 2006 Décret danois, BEK nr 681 du 25/05/2020 Règlement (CE) 10/2011 du 14 janvier 2011 Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017

Fiche technique du couvercle	
Matériau du couvercle	LLDPE (Polyéthylène)
Poids	13 g
Marqué	CE
Lave-vaisselle	Lave-vaisselle 65° C Lave-vaisselle industriel à 80° C jusqu'à 3 minutes Cependant, le couvercle peut ternir et sa qualité se détériorer ; il est donc recommandé de le laver à la main.
Micro-ondable	Non
N° UDI-DI de base	57048311BU
UDI-DI HENROCUP® petit couvercle	5704831000271
UDI-DI HENROCUP grand couvercle	5704831000011
Normes et réglementations	Règlement (CE) 1935/2004 du 27 octobre 2004 Règlement (CE) 2023/2006 du 22 décembre 2006 Décret danois, BEK nr 681 du 25/05/2020 Règlement (CE) 10/2011 du 14 janvier 2011 Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017