

## Gebrauchsanleitung

# Greifhilfe Adler

Art.-Nr. 14671 115/14671 110

61,3 cm lang

HMV-Nr. 02.40.04.1025

Art.-Nr. 14671 125/14671 120

76 cm lang

HMV-Nr. 02.40.04.1025

Art.-Nr. 14671 135/14671 130

90 cm lang

HMV-Nr. 02.40.04.1025




**Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf!**

### Indikationen/Kontraindikationen

Die Greifhilfe unterstützt bewegungseingeschränkte Personen beim Aufheben und Heranholen von Gegenständen, sodass dies nicht mehr mit Bücken und Strecken verbunden ist. Der Handgriff ist ergonomisch gestaltet.

#### ⚠ Sicherheitshinweise ⚠


- Die Greifhilfe ist für den Gebrauch in der häuslichen Umgebung und entsprechende Umgebungstemperaturen konzipiert.
- Die Greifhilfe darf nicht zu lange in der Nähe von Hitzequellen gelagert werden oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein.
- Zu heiße Gegenstände sollten nicht mit der Greifhilfe herangeholt werden – die Gummibeschichtung der Greifzangen könnte beschädigt werden. Eine Temperatur größer als 60 °C ist zu vermeiden.
- Richten Sie die Greifhilfe nicht auf Menschen und Tiere und halten Sie die Greifzange stets von den Augen fern. Verletzungsgefahr!
- Bitte beachten Sie, dass der heranzuholende Gegenstand ein Gewicht von 0,6 kg nicht übersteigt. Schwerere Objekte können in der Handhabung für den Benutzer problematisch werden.
- Die Greifhilfe ist nur für den Kontakt mit intakter Haut bestimmt.

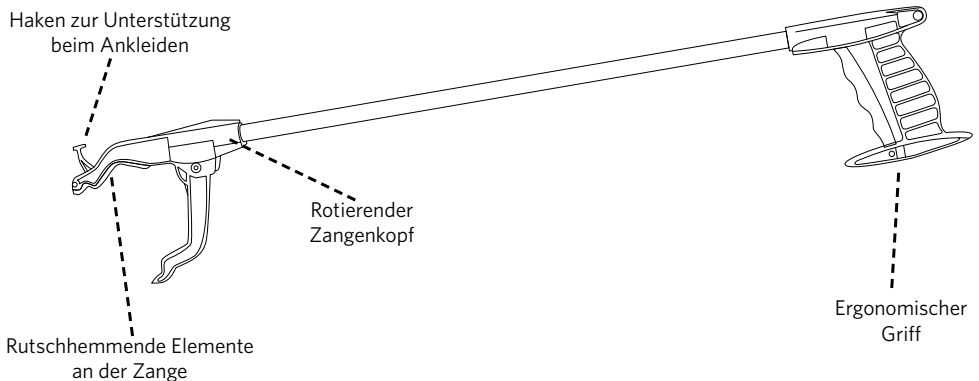

## Justieren des Zangenkopfes

Der Zangenkopf kann herausgezogen und wieder in Richtung Handgriff zurück geschoben werden. Sie können damit die Öffnung der Greifklauen justieren.

Die optimale Position des Zangenkopfes erhalten Sie durch vorsichtiges Justieren des Kopfes nach vorn und hinten. Ein präzises Schließen der Greifklauen sowie das Betätigen des Abzugs kann so optimiert werden.

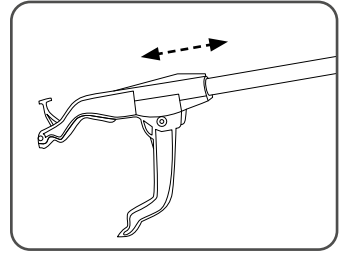

## Anwendung

Nehmen Sie ggf. ein Feinjustieren des Zangenkopfes vor, s. Beschreibung oben. Durch das Drücken des Handgriffes schließen Sie die Greifhilfe. Der zu hebende oder heranzuholende Gegenstand wird so festgehalten. Das Loslassen des Griffes öffnet die Greifhilfe und gibt den Gegenstand wieder frei. Um ein Drehen der Handgelenke zu vermeiden, kann der Greifkopf um 360° in beide Richtungen gedreht werden.

## Reinigung

Für die Reinigung ein feuchtes Tuch und einen handelsüblichen milden Reiniger verwenden. Keine ätzenden oder scheuernden Reiniger verwenden. Die Greifhilfe anschließend vollständig trocknen lassen.

## Material

- Griff: Polypropylen, Acrylnitril-Butadien-Styrol
- Greifrohr: Aluminium
- Greifkopf: Polypropylen, Thermoplastisches Elastomere

## Entsorgung

Entsorgen Sie die Greifhilfe nicht einfach über den normalen Hausmüll. Fragen Sie vorher Ihr kommunales Entsorgungsunternehmen nach der sach- und umweltgerechten Entsorgung in Ihrer Region.

## Technische Daten

- Länge: 61,3 cm, 76 cm, 90 cm
- Gewicht: 170 g, 185 g, 203 g
- Öffnung Greifkopf: ca. 8,5–9,5 cm
- Greif-/Traglast: max. 0,6 kg
- Max. Temperatur: 60 °C

**MD** Dieses Produkt entspricht der Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte und trägt eine CE-Kennzeichnung. **CE**

Sollte es im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt zu einem schwerwiegenden Vorfall kommen, kontaktieren Sie den Hersteller dieses Produktes sowie die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Deutschland: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM, [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de).

Österreich: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen BASG, [www.basg.gv.at](http://www.basg.gv.at).

Schweiz: Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic, [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch).