




1. Auf der Rückseite beginnen
 1. Commencer par le côté dos
 1. Iniziare del retro

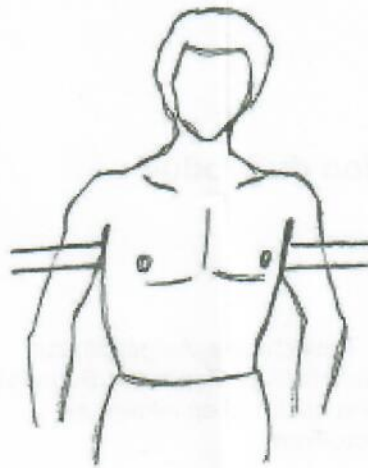


1. Vorderansicht
 1. Vue côté poitrine
 1. Veduta di fronte

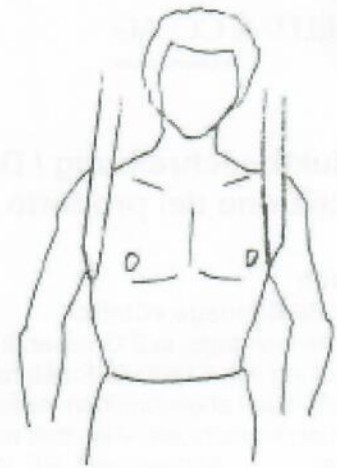


2. Bänder über die Schulter führen.
 2. Passer les bandages au-dessus des épaules.
 2. Condurre i nastri sulle spalle.

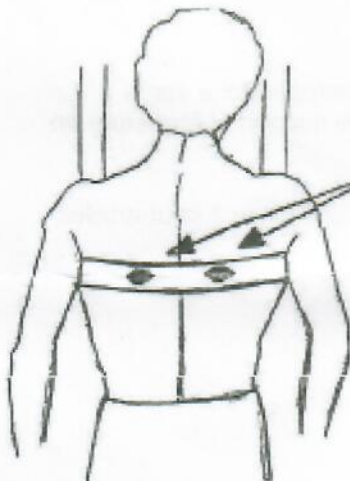


3. Die beiden schwarzen Klettstücke passend platzieren.
 3. Placer les deux éléments Velcro noirs aux endroits correspondants.
 3. Piazzare entrambi i velcri neri in modo appropriato.

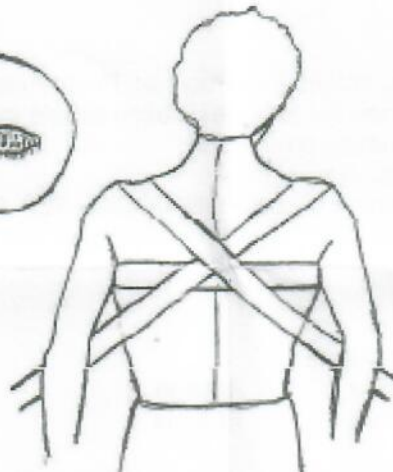

4. Bänder genau über die Klettstücke kreuzen und satt anziehen.
 4. Croiser les bandages en passant exactement au-dessus des éléments Velcro noirs et serrer.
 4. Incrociare i nastri esattamente sui punti velcro e stringere bene.

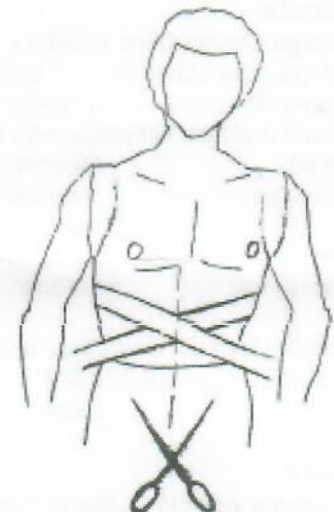

5. Die Bänder spannen und übereinander halten. Dann auf Länge zuschneiden.
 5. Tenir les bandages serrés et bien croisés, les couper ensuite à la longueur souhaitée.
 5. Tendere i nastri e sovrapporli l'uno sull'altro. A questo punto tagliare la lunghezza esatta.

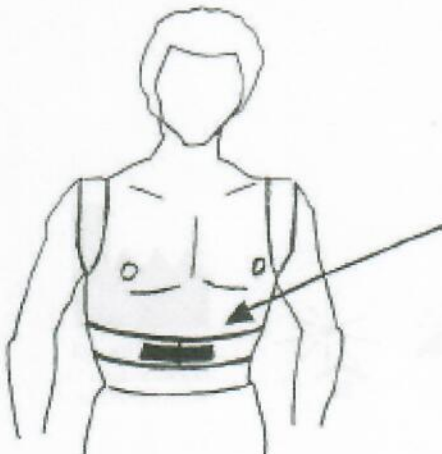

6. Beide Enden zusammenhalten und den weißen Klettverschluss montieren.
 6. Garder les deux bouts joints et placer la fermeture Velcro blanche.
 6. Tenere unite entrambe l'estremità e montare la chiusura a velcro bianca