



FERMETURE ÉCLAIR



FONCTION 2 EN 1

MODE D'EMPLOI SOMNA® BLANKET BALANCE

Retrouvez le calme avec la Somna® Blanket Balance. Les chaînes cousues dans les canaux longitudinaux maintiennent la couette près du corps et procurent une agréable pression enveloppante.



UTILISATION

Les chaînes de Somna® Blanket Balance sont placées plus au centre, en accord avec la position du corps, ce qui procure un effet enveloppant.

Somna® Blanket Balance a une fonctionnalité 2 en 1, un côté avec des chaînes et un côté rembourré. Chacun choisit le côté qu'il préfère avoir contre son corps. Les chaînes tournées vers le corps procurent une stimulation tactile plus importante. Il faut tester les deux côtés pour trouver celui qui convient le mieux.

Introduire la Somna® BlanketBalance dans une housse de couette. Vous pouvez dormir toute la nuit avec la couette, mais il est recommandé de l'utiliser au début sur des périodes plus courtes pour s'y habituer. Augmenter ensuite la durée petit à petit. La souplesse de la couette permet aussi de la plier en deux, si vous souhaitez plus de poids sur un endroit spécifique du corps. La couette est fabriquée de façon à rester aussi fraîche que possible.

Mettre la couette sur les épaules et la laisser prendre la forme du corps procure un calme apaisant lorsqu'on se repose au cours de la journée.

CONSEILS D'ENTRETIEN



Maximum 60° C - programme doux



Pas de séchage tambour



Pas de repassage



Pas de produits blanchissants



N'utiliser aucun liquide plus puissant que le perchloroéthylène en cas de nettoyage à sec



La couette munie d'une fermeture à glissière doit être ouverte avant le lavage. Vous pouvez utiliser le filet à linge.

INFORMATIONS PRODUIT



Somna® Blanket Balance répond aux exigences de la norme d'allumabilité sous l'action d'une cigarette en combustion (SS-EN ISO 12952-2). Tissu extérieur en Trevira CS résistant au feu.



Somna® Blanket Balance est approuvé CE conformément à la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.



Somna® Blanket Balance est un produit suédois breveté.

DIMENSIONS/POIDS

200 x 140 cm / 8 kg

REMARQUE

- En cas de faible capacité pulmonaire, demander conseil à un médecin avant d'utiliser une couette lourde.
- Demander conseil à un médecin pour savoir si le dispositif implanté pourrait être impacté par les chaînes en acier.
- Faire attention au risque de trébucher si la couette lourde se trouve par terre.
- Faire attention en cas de faible capacité musculaire.