



REIßVERSCHLUSS



2-1 FUNKTION

## GEBRAUCHSANWEISUNG SOMNA® BLANKET SLEEPIE

Mit der Somna® Blanket Sleepie kommen Sie zur Ruhe. Die Ketten in den längsverlaufenden Kanälen sorgen dafür, dass sich die Decke eng und mit angenehmem Druck um den Körper legt.



### GEBRAUCH

Die Somna® Blanket Sleepie basiert auf Somnas eigener patentierter Lösung mit eingenähten Ketten in längsverlaufenden Kanälen. Das Gewicht, der Druck und das Gefühl der Geborgenheit wirken beruhigend und fördern die Schlafqualität.

Die Ketten sind an beiden Enden befestigt und können nicht herausgenommen werden. Die Ketten sind lackiert und damit vollständig geräuschlos. Um den Komfort zu erhöhen, sind die Ketten beidseitig mit einer Schicht Watte bedeckt.

Beziehen Sie die Somna® Blanket Sleepie mit einem normalen Bettdeckenbezug. Sie können die ganze Nacht über mit der Decke schlafen. Allerdings empfehlen wir, die Decke zur Eingewöhnung anfangs für kürzere Zeiträume zu verwenden. Anschließend können Sie die Anwendungsdauer Stück für Stück erhöhen.

Dank ihrer Flexibilität können Sie die Decke auch umschlagen, wenn Sie an einer bestimmten Körperstelle ein höheres Gewicht wünschen.

Wenn die Somna® Blanket Sleepie über die Schultern gelegt wird, formt sie sich während des Sitzens nach dem Körper und sorgt für Entspannung während der Tagesruhe.

## PFLEGEHINWEISE

Decke vor dem Waschen teilen und jede Hälfte separat waschen.



Schonwaschgang bei max. 60 °C



Nicht in den Wäschetrockner geben



Nicht bügeln



Kein Bleichmittel verwenden



Bei der chemischen Reinigung keine kräftigeren Flüssigkeiten als Tetrachlorethylen verwenden.



## PRODUKTINFORMATION



Die Somna® Blanket Sleepie ist ein schwedisches patentiertes Produkt.

## GRÖSSE/GEWICHT

200 x 150 cm / 5, 7, 9, 11 kg.

## HINWEIS

- Bei schwacher Lungenkapazität sollte vor Anwendung einer Gewichtsdecke ein Arzt konsultiert werden.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt, ob implantierte Geräte durch die Stahlketten beeinträchtigt werden können.
- Die Gewichtsdecke kann eine Stolpergefahr darstellen, wenn sie auf dem Fußboden liegt.

PRODUCENT

**somna**®

SOMNA AB

somna.com | info@somna.com

VERTRIEB DEUTSCHLAND



ATC Handels GmbH

ATC HANDELS GmbH

therapiebedarf24.de | info@therapiebedarf24.de

20180815