

MA Spacer (MIS Akin Spacer)



+ARCO

MA Spacer (MIS Akin Spacer)

Séparateur d'orteils

1. Commencez par vous faire une idée précise de l'indication et de la pose.
2. Appliquez le séparateur d'orteils sur la peau propre (nettoyée avec de l'eau chaude et du savon classique) et sèche.
3. Insérez le séparateur d'orteils entre le 1er et le 2e orteils. La section concave est la partie proximale ; vérifiez que le MA Spacer épouse totalement l'espace entre les orteils.
4. L'aile la plus longue est en contact avec le dos du pied pendant que la plus courte pointe vers la plante.
5. Le matériau médical souple épouse naturellement le contour des orteils.
6. Utilisez des bandes pour fixer l'accessoire.



Indications

- > Traitement postopératoire après une opération d'un hallux valgus (ostéotomie de Akin sans matériel d'ostéosynthèse)
- > Traitement conservateur en cas d'hallux valgus

Contre-indications :

- > Lésions cutanées étendues
- > Plaies ouvertes présentant un risque d'infection
- > Diagnostics incertains
- > Réactions cutanées allergiques au silicone

Données techniques

Taille : Taille standard | 11 mm | porté à droite ou à gauche

Couleur : blanc

Matériau : Silicone médicale

Entretien : Le produit ne nécessite pas d'entretien.

Caractéristiques de fabrication

> La partie concave proximale épouse l'espace entre le 1er et le 2e orteils.

Attention

Suivez toujours les instructions de ce mode d'emploi. Veuillez informer votre médecin en cas d'effets indésirables (p.ex. gonflement de la peau, points de pression, troubles de la circulation sanguine, etc.). Le bon fonctionnement du produit et la protection optimale offerte ne sont plus assurés en cas de manipulation incorrecte. Cet accessoire vise à guérir et doit être utilisé exclusivement selon les instructions de votre médecin ou d'un professionnel de la médecine (ou en concertation). DARCO (Europe) GmbH décline toute responsabilité à cet égard. Le port de bandages est recommandé. Pendant que vous portez cet accessoire, nous vous recommandons de ne pas conduire de véhicule. Soyez prudent dans les escaliers (p. ex. pour franchir les trottoirs) et lorsque vous marchez sur terrain accidenté. Marchez plus lentement qu'à l'accoutumée. Cet accessoire est destiné à être utilisé pour un seul patient.

Conseils de nettoyage

Le séparateur d'orteils MA Spacer (MIS Akin Spacer) est lavable et peut être désinfecté si nécessaire. Pour nettoyer le produit, utilisez du savon de ménage, sans solvant. Laissez bien sécher le produit.